

Instrukcja używania krzesła ewakuacyjnego XYH - 5H



Cechy krzesła ewakuacyjnego:

1. Regulowany uchwyt: naciśnij drążek, aby wyregulować dźwignię uchwytu (w sumie 3 pozycje). Podłokietniki można pozostawić podniesione, co jest wygodniejsze w obsłudze podczas wchodzenia i schodzenia po schodach, oraz złożyć podczas transportu poziomego.
2. Gąsienice muszą być równoległe do schodów podczas wchodzenia i schodzenia i odkładane podczas poruszania się po ziemi.
3. Uchwyty przednie mogą służyć również jako oparcie rąk pacjenta. Do przenoszenia służą tylne i przednie dolne uchwyty.
4. Pokrycie siedzenia jest zdejmowane. W przypadku zabrudzeń należy je lekko przetrzeć szmatką zwilżoną wodą.
5. Przednie koła są skrętne, co ułatwia manewrowanie wózkiem w wąskich korytarzach.

Parametry techniczne:

Waga krzesła: 21kg

Rozmiar krzesła podczas użytkowania: 160*48.5*120cm

Rozmiar krzesła złożonego: 109*48.5*25cm

Maksymalne obciążenie: 160 kg

Właściwości produktu:

- Stosowany głównie do transportu pacjentów w różnego rodzaju budynkach. Do obsługi schodzenia i wchodzenia po schodach wymagane są dwie osoby. Specjalnie zaprojektowane gumowe gąsienice wspomagają transport pacjenta.
- Dzięki 4 odpornym na zużycie gumowym kółkom, krzesło może służyć dodatkowo jako wózek inwalidzki.
- Krzesło wyposażone jest w pasy zapewniające bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu.
- Wykonany z wytrzymałego stopu aluminium sprzęt ratunkowy charakteryzuje się lekkością, kompaktowymi rozmiarami, łatwością przenoszenia, bezpieczeństwem oraz łatwością sterylizacji i czyszczenia.

Instrukcja obsługi krok po kroku:

1. Rozłóż krzesło ewakuacyjne. Zablokuj koła hamulcami postojowymi znajdującymi się nad tylnymi kołami.
2. Przenieś pacjenta na siedzisko i zabezpiecz pasami bezpieczeństwa. Rozłóż podnózek, żeby mógł swobodnie oprzeć na nim swoje stopy. Przed przystąpieniem do kolejnego kroku - zwolnij hamulec postojowy, ale w tym czasie przytrzymuj wózek ręką.
3. Podczas transportu pacjenta z wyższego piętra na niższe - użyj odchylanych gąsienic w celu ułatwienia ewakuacji. Tą czynność wykonuj zawsze we dwie osoby!
4. Kiedy chcesz przetransportować pacjenta na wyższą kondygnację - użyj do tego odchylanych rączek z tyłu oraz wysuń przednie rączki znajdujące się nad skrętnymi kołami. Tą czynność wykonuj zawsze we dwie osoby!
5. Po wykonaniu czynności zawsze używaj hamulców postojowych znajdujących się nad tylnymi kołami. Jeżeli wózek jest nieużywany, zawsze blokuj koła hamulcem.
6. To nie jest zabawka, nie wolno dopuszczać do obsługi krzesła osoby niepełnoletnie, z dysfunkcjami fizycznymi lub umysłowymi. Małe części mogą być połknięte lub wchłonięte.
7. Zawsze przed przystąpieniem do użycia wózka upewnij się, że jesteś wystarczająco zabezpieczony do przetransportowania pacjenta. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz pomocy - nie używaj go samodzielnie.

Na wyrób medyczny dystrybutor udziela 24-miesięcznej gwarancji.

Wyłącznie dystrybutor:

Bifarm sp. z o.o.
ul. Żurawia 71
15-541 Białystok
info@bifarm.pl

